

TR1

TACTICAL RESPIRATOR I

Kasutusjuhend

Safety First

TR1 on väga efektiivne osakeste respiraator. Kui kasutada toodet korrektselt, siis aitab see vältida teil kahjulike, lendivate osakeste, allergeenide, viiruste ja bakterite sissehingamist. Nagu igat professionaalse taseme varustust, tuleb ka TR1 kohelda hoolsalt, et tagada toote pikaajaline kestvus ja enda turvalisus.

Ei sobi lastele

TR1 respiraatorit soovitatakse kasutamiseks alates 12 eluaastast.

Mitte modifitseerida

TR1 on mõeldud kasutamiseks oma algse kujul. Maski muutmine katkestab toote garantii, tõenäoliselt rikub toote ja võib tekitada kahju kandja tervisele.


Korrektne puhastamine

Soovitame teil maski puhastada sooja vee ja seebiga, iga filtri vahetuse ajal. TR1 maski võibvees keeta

Filtri Vahetamine


1. samm

Hoidke TR1 püstises asendis

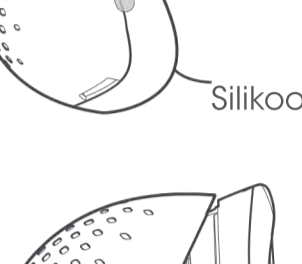

2. samm

Tõmmake korpus silikoon servast eemale, joonisel näidatud kohast

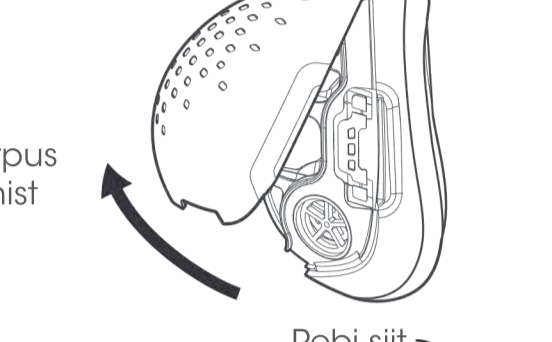


3. samm

Tõmmake korpus õrnalt silikoonist eemale



4. samm


Filtri esimene külg on pakendi läbipaistva külje poole. Jätke see meelde, kui filtrit pakist eemaldate

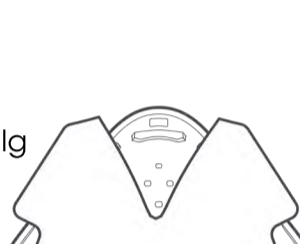

5. samm

Filtri eesmise külje **peab** asetama allapoole korpuse sisse


Kile näost eemale

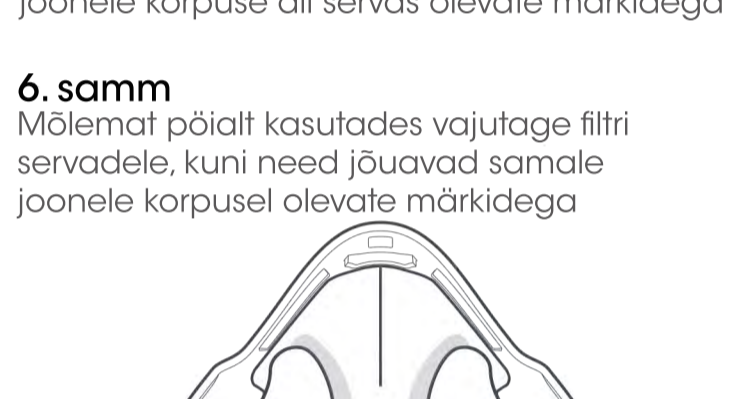

Esmalt sättige filtri alumine serv samale joonele korpuse all servas olevate märkidega


6. samm

Mõlemat pöialt kasutades vajutage filtri servadele, kuni need jõuavad samale joonele korpusel olevate märkidega

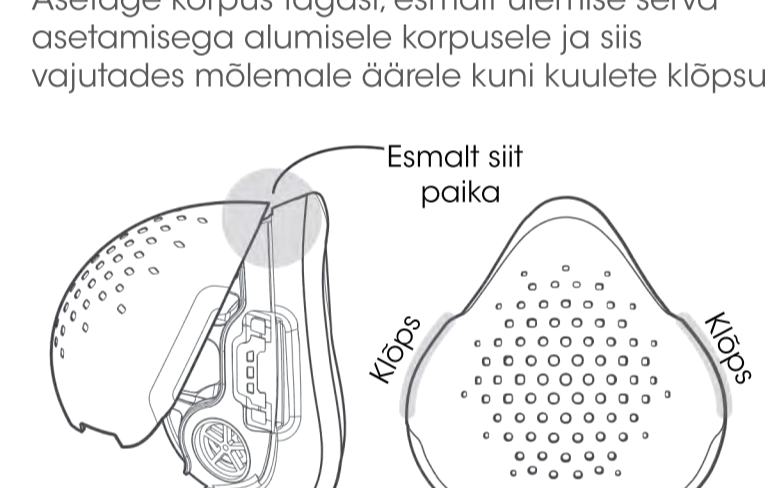

7. samm


Asetage korpus tagasi, esmalt ülemise serva asetamisega alumisele korpusele ja siis vajutades mõlemale äärele kuni kuulete klõpsu

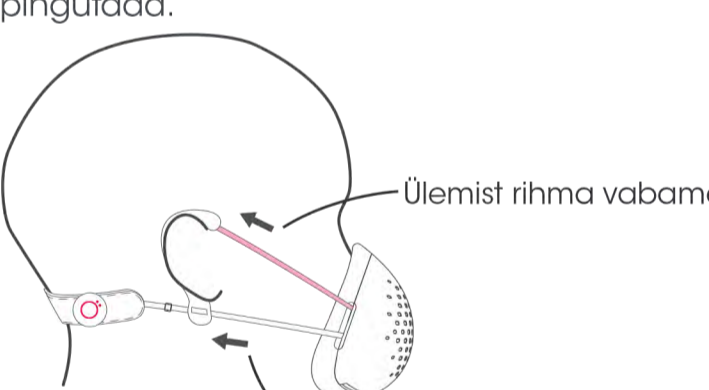

Rihmade reguleerimine


1. samm

Reguleerige ülemiste rihmade pikkust, mõlemal pool, kuni mask istub mugavalt teil nina peal. Tõmmake ülemist rihma, et seda vabastada ja alumist rihma, et seda pingutada.

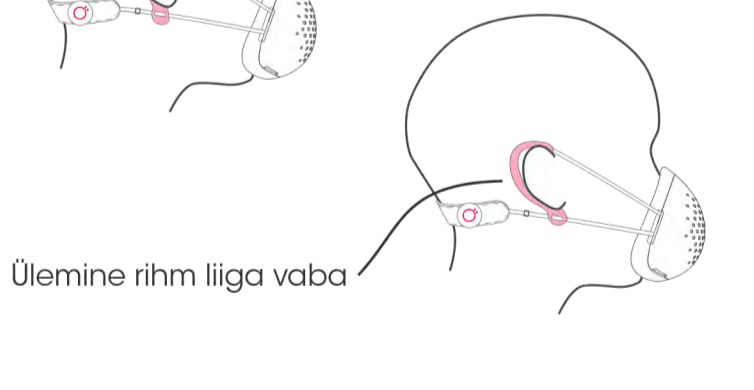


Vale kasutamine

Paigutage kõrva-aas nagu näitab 1. samm.

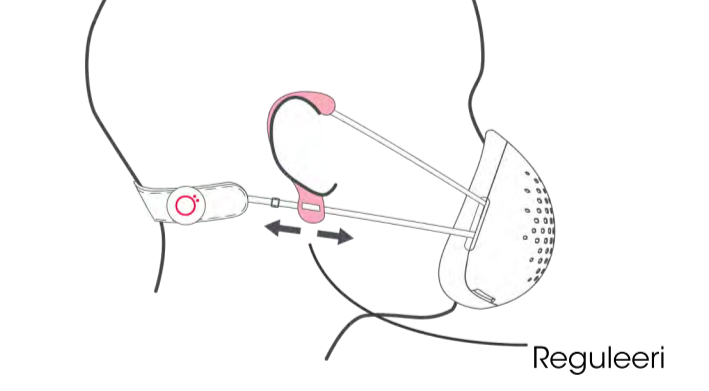


2. samm

Lükake kõrva-aasa alumist otsa mööda rihma, kuni see on mugavalt kõrva taga. Korrake sama teisel küljel.

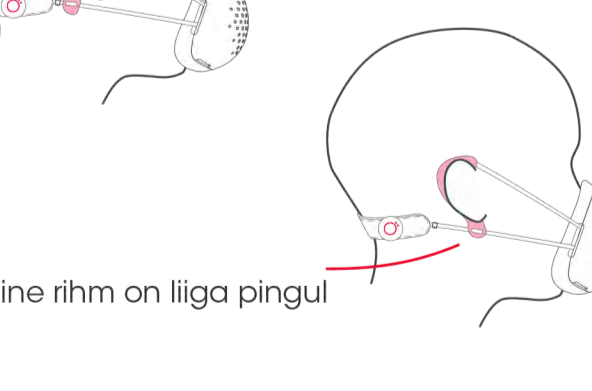


Vale kasutamine

Paigutage kõrva-aas nagu näitab 2. samm.

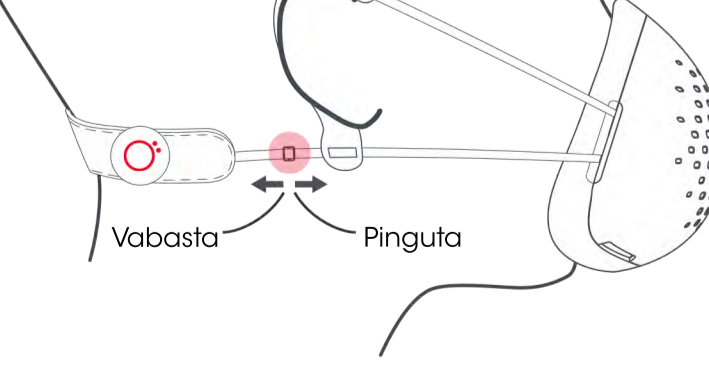

4. samm

Reguleerige klambreid mõlemal küljel, kuni rihm on teil mugavalt ümber kaela.

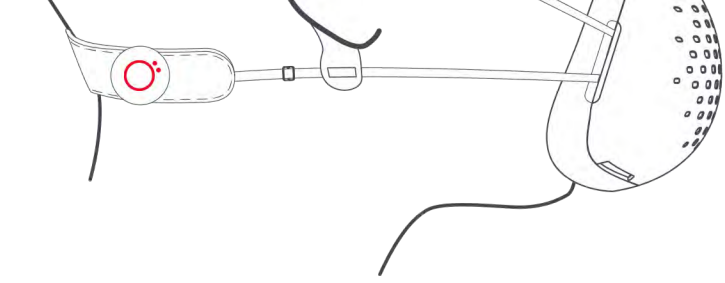

5. samm

Mask peab olema turvaliselt, kuid mugavalt teil ees. Maski silikoonist serv peab olema teil vastu nägu sama survega, kogu serva ulatuses.

